

Desinet-oxy

Flüssiges Konzentrat auf der Wirkstoffbasis aktiven Sauerstoffs zur Desinfektion von Oberflächen

- ▶ Extrem breites Wirksamkeitsspektrum gegen Bakterien, Hefen, behüllte und unbehüllte Viren sowie Bakteriensporen und Tuberkuloseerreger
- ▶ Hohe Anwenderfreundlichkeit
- ▶ Geruchsneutral
- ▶ Keine toxischen Rückstände
- ▶ Hohe Materialverträglichkeit (inkl. sensibler Kunststoffe wie Acrylglas)
- ▶ Gute Reinigungsleistung, besonders bei Fettablagerungen
- ▶ Hinterlässt eine rutschfeste Oberfläche



Anwendungsbereich

Zur Desinfektion von wasserbeständigen Boden-, Wand-, Decken- und Mobiliarflächen in hygiene relevanten Bereichen.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Nicht geeignet zur Desinfektion von unedlen Metallen, wie z. B. Messing, Kupfer und nicht korrosionsbeständigem Stahl. Eine Anwendung auf Aluminium erfordert vor der ersten Anwendung eine Prüfung an unauffälliger Stelle. Nur auf optisch sauberen Flächen anwenden.

Herstellen der Gebrauchslösung:

Lösung immer mit kaltem Wasser ansetzen! Dosierung siehe Tabelle.

Flächendesinfektion:

Fläche mit Desinfektionslösung vollständig benetzen und mit Reinigungstextil oder Reinigungsgerät bearbeiten. Ein optimales Ergebnis wird in Kombination mit Clean@oxy sichergestellt.

Präparation der Reinigungstextilien:

Vor der Anwendung des Produktes werden die Reinigungstextilien im ProMop-Waschprozess gebrauchsfertig präpariert und bis zum Einsatz in Boxen gelagert.

Flächen und Küchengeräte, die direkt mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit Trinkwasser spülen.



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Produkt mit Entgasungsverschluss – Lagerung ausschließlich in aufrechter Position. Kein Verbraucherprodukt nach (EU) 2019/771 Art. 2! Nur für professionelle Anwender mit entsprechender Sachkunde gemäß nationalen Verordnungen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

DE: BAuA Reg.-Nr. N-110347, CH: Eidg. Zul. CHZN7489, PT 02, PT 04

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Biozide.

pH-Wert (Konzentrat): ca. 2

Wirkstoffe in 100 g:

20,0 g Kaliumperoxymonosulfat (CAS: 70693-62-8).

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j3515sx30	8 x 250 ml Flaschen + 8 x 25 ml Dosierbeutel Clean@oxy (Karton)	
j3515kn	5 L Kanister (Karton)	102
j3515kp	10 L Kanister (Karton)	45
j351572	200 L Fass	2

Desinet-oxy

Flüssiges Konzentrat auf der Wirkstoffbasis aktiven Sauerstoffs zur Desinfektion von Oberflächen

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, Gefahr. H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. EUH208 Enthält Dikaliumperoxodisulfat; Kaliumpersulfat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält: Potassium Monopersulfate (INCI)

Prüfungen und Listungen

Dosierempfehlung für die Flächendesinfektion im Gesundheitswesen, industriellen und institutionellen Bereich (mit Clean@oxy)

Prüfmethode	Wirksamkeitsspektrum	Belastung	Dosierung Desinet-oxy	Dosierung Clean@oxy	Einwirkzeit
EN 16615 Flächendesinfektion mit Mechanik	bakterizid / levurozid	gering	1,5 % 150 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	30 min
EN 14476 / EN 16777	viruzid				15 min
EN 17126 Quantitativer Suspensionsversuch	sporozid (C. difficile)	gering	3 % 300 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	30 min
EN 14348	mykobakterizid	gering	3 % 300 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	60 min
			6 % 600 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	30 min
EN 13697 Flächendesinfektion ohne Mechanik	bakterizid / levurozid	gering	1,5 % 150 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	60 min
			3 % 300 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	30 min

Dosierempfehlung VAH

Prüfmethode	Wirksamkeitsspektrum	Belastung	Dosierung Desinet-oxy	Dosierung Clean@oxy	Einwirkzeit
VAH-zertifizierte Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion mit Mechanik	bakterizid / levurozid	gering	3 % 300 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	30 min
			1,5 % 150 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	60 min

Dosierempfehlung für die Flächendesinfektion im Lebensmittelbereich (mit Clean@oxy)

Prüfmethode	Wirksamkeitsspektrum	Belastung	Dosierung Desinet-oxy	Dosierung Clean@oxy	Einwirkzeit
EN 16615 Flächendesinfektion mit Mechanik	bakterizid / levurozid	gering	1,5 % 150 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	30 min
EN 14476 / EN 16777	viruzid				15 min
EN 14348	mykobakterizid	gering	3 % 300 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	60 min
			6 % 600 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	30 min

Desinet-oxy

Flüssiges Konzentrat auf der Wirkstoffbasis aktiven Sauerstoffs zur Desinfektion von Oberflächen

Prüfmethode	Wirksamkeitsspektrum	Belastung	Dosierung Desinet-oxy	Dosierung Clean@oxy	Einwirkzeit
EN 13697 Flächendesinfektion ohne Mechanik	bakterizid / levurozid	gering	1,5 % 150 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	60 min
			3 % 300 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	30 min

Weitere Prüfungen

Prüfmethode	Wirksamkeitsspektrum	Belastung	Dosierung Desinet-oxy	Dosierung Clean@oxy	Einwirkzeit
EN 14476 Quantitativer Suspensionsversuch	Noroviren	gering	1,5 % 150 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	1 min
	Adenoviren				5 min
	Poliovirus				15 min
EN 16777 Quantitativer Oberflächenversuch	Noroviren	gering	1,5 % 150 ml/10 L	0,3 % 30 ml/10 L	15 min
	Adenoviren				15 min

Dosierempfehlung für die Flächendesinfektion im Gesundheitswesen, industriellen und institutionellen Bereich (ohne Clean@oxy)

Prüfmethode	Wirksamkeitsspektrum	Belastung	Dosierung Desinet-oxy	Einwirkzeit
EN 16615 Flächendesinfektion mit Mechanik	bakterizid / levurozid	gering	1,5 % 150 ml/10 L	60 min
			3 % 300 ml/10 L	30 min
EN 14476 / EN 16777	viruzid	gering	1,5 % 150 ml/10 L	15 min
EN 17126 Quantitativer Suspensionsversuch	sporozyd (C. difficile)	gering	6 % 600 ml/10 L	30 min
EN 14348	mykobakterizid	gering	6 % 600 ml/10 L	60 min
EN 13697 Flächendesinfektion ohne Mechanik	bakterizid / levurozid	gering	1,5 % 150 ml/10 L	60 min
			3 % 300 ml/10 L	30 min

Dosierempfehlung für die Flächendesinfektion im Lebensmittelbereich (ohne Clean@oxy)

Prüfmethode	Wirksamkeitsspektrum	Belastung	Dosierung Desinet-oxy	Einwirkzeit
EN 16615 Flächendesinfektion mit Mechanik	bakterizid / levurozid	gering	1,5 % 150 ml/10 L	60 min
			3 % 300 ml/10 L	30 min
EN 14476 / EN 16777	viruzid	gering	1,5 % 150 ml/10 L	15 min
EN 14348	mykobakterizid	gering	6 % 600 ml/10 L	60 min

Desinet-oxy

Flüssiges Konzentrat auf der Wirkstoffbasis aktiven Sauerstoffs zur Desinfektion von Oberflächen

Prüfmethode	Wirksamkeitsspektrum	Belastung	Dosierung Desinet-oxy	Einwirkzeit
EN 13697 Flächendesinfektion ohne Mechanik	bakterizid / levurozid	gering	1,5 % 150 ml/10 L	60 min
			3 % 300 ml/10 L	30 min